


## Kurzgebrauchsanweisung für Pflegebett Modell 3010


### A. Seitensicherungen

Um die Seitensicherungen hochzustellen, ziehen Sie die Seitensicherung nach oben (1). Beginnen Sie mit dem kopfseitigen Teil der Seitensicherung.

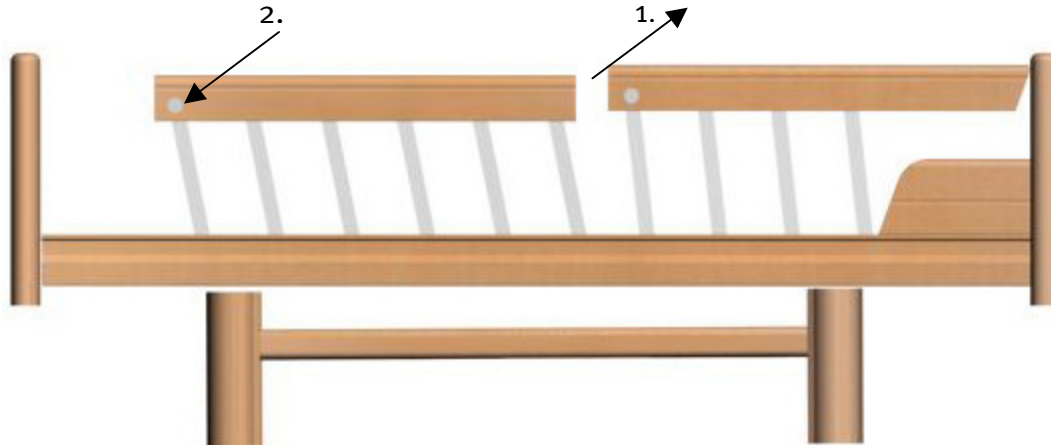

Um die Seitensicherungen herabzulassen, drücken Sie den Knopf am unteren Ende des jeweiligen Elements der Seitensicherung (2) und bewegen die Seitensicherung nach unten. Beginnen Sie mit dem fußseitigen Teil der Seitensicherung.

### B. Patientenhandschalter

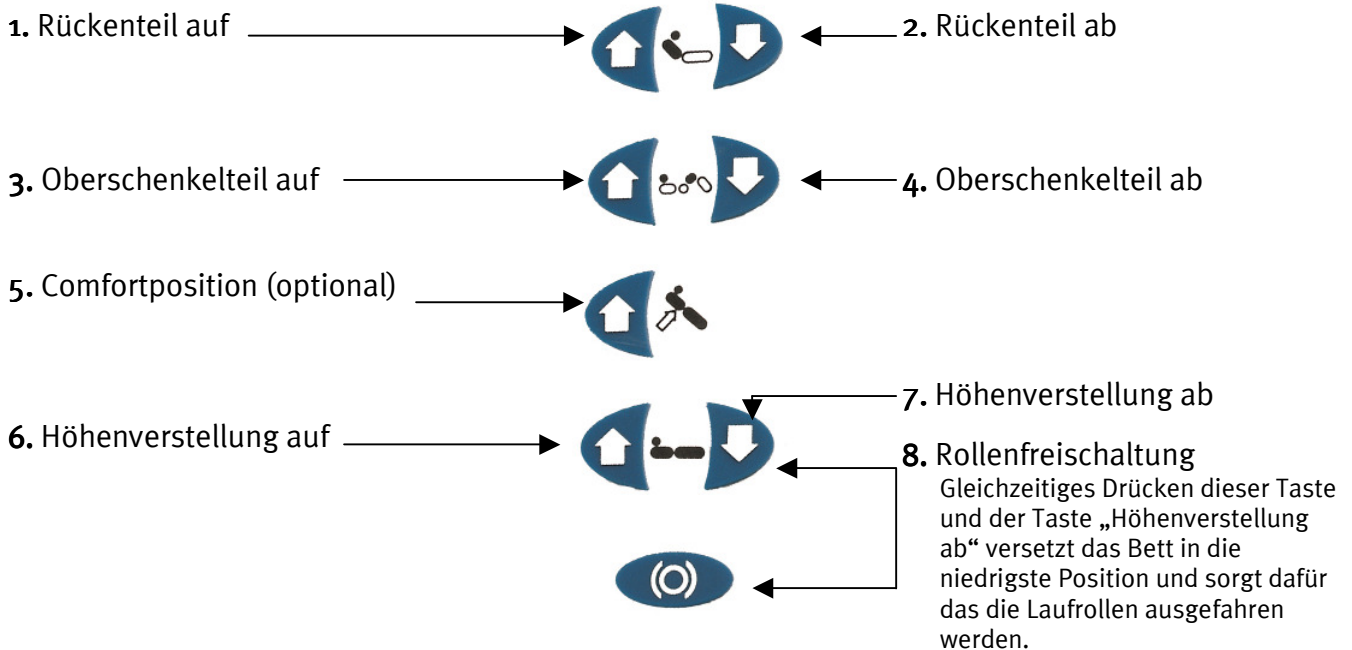

## Kurzgebrauchsanweisung für Pflegebett Modell 3010

### C. Personaltastatur (optional)

#### Trendelenburg


Hebt die gesamte Liegefläche fußseitig hoch.

#### Comfortstellung

Hebt die gesamte Liegefläche kopfseitig hoch.

#### Rückenteil

Anheben und Absenken des Rückenteils.

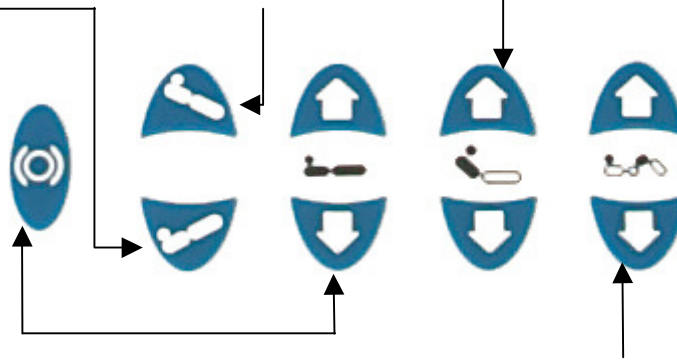

#### Rollenfreischaltung

Gleichzeitiges Drücken dieser Taste und der Taste „Höhenverstellung ab“ versetzt das Bett in die niedrigste Position und sorgt dafür das die Laufrollen ausgefahren werden.

#### Höhenverstellung \*

Hebt/Senkt die gesamte Liegefläche des Bettes in die gewünschte Position auf und ab.

#### Beinteil

Anheben und Absenken des Beinteils.

\* Länderspezifisch kann die Personaltastatur mit einer Automatikfunktion (Doppelklick) ausgestattet sein.

### D. Funktionen sperren

#### a) Patientenhandschalter

Durch die Aktivierung der Sperre auf der Rückseite des Patientenhandschalters werden alle Funktionen des Handschalters gesperrt. Die Personaltastatur bleibt funktionsfähig.

#### b) Personaltastatur

Durch die Aktivierung der Sperre an der Personaltastatur werden alle Funktionen des Patientenhandschalters und der Personaltastatur gesperrt.



Aktivierung der Sperre



Deaktivierung der Sperre



**Sollten die Funktionen des Bettes nicht bedienbar sein, überprüfen Sie bitte die Sperren am Handschalter und der Personaltastatur.**



**Bitte beachten Sie die Hinweise in der ausführlichen Gebrauchsanweisung**