

Gebrauchsanweisung für SG-Schutzbezug Modell ZP-3056 für Pflegebett Modell 3010



1. Stellen Sie die beiden Seitengitter auf.



Achten Sie darauf, dass zwischen dem kopfseitigen Seitengitter und dem Kopfteil des Bettes kein Freiraum ist!

2. Legen Sie den SG-Schutzbezug über die Seitengitter, ziehen Sie den waagerechten Gurt darum und verbinden Sie die beiden Clip-Verschlüsse miteinander.



3. Ziehen Sie die drei senkrecht angebrachten Gurte um das Seitenwangenprofil herum und verbinden Sie die Clip-Verschlüsse miteinander.



4. Verschieben Sie den SG-Schutzbezug so, dass das Seitengitter komplett abgedeckt ist und ziehen Sie dann alle Gurte straff an.



Beachten Sie, dass die Gurte so straff wie möglich angezogen sein müssen!



Sperren Sie den Handschalter, bzw. bewahren Sie ihn außerhalb der Reichweite des Bewohners auf!