

A. Seitensicherung S 960 - 1 :


Um ein Seitensicherungsteil aufzustellen,

ziehen Sie das Teil seitlich horizontal bis zum Anschlag heraus und klappen Sie es hoch.


Um die Höhe der Seitensicherung einzustellen, ziehen Sie den teleskopierbaren Teil bis zum Anschlag nach oben.

Zum Herunterklappen des Seitensicherungsteils


1. die beiden Knöpfe auf der Außenseite des Rahmens drücken um den höhenverstellbaren Teil des Sicherungsteils in die niedrigste Position zu bringen.
2. Den Auslöser nach unten drücken und das Seitensicherungsteil in die Horizontale kippen, so das es sich parallel zum Boden befindet.
3. Die Seitensicherung vollständig unter die Liegefläche schieben.

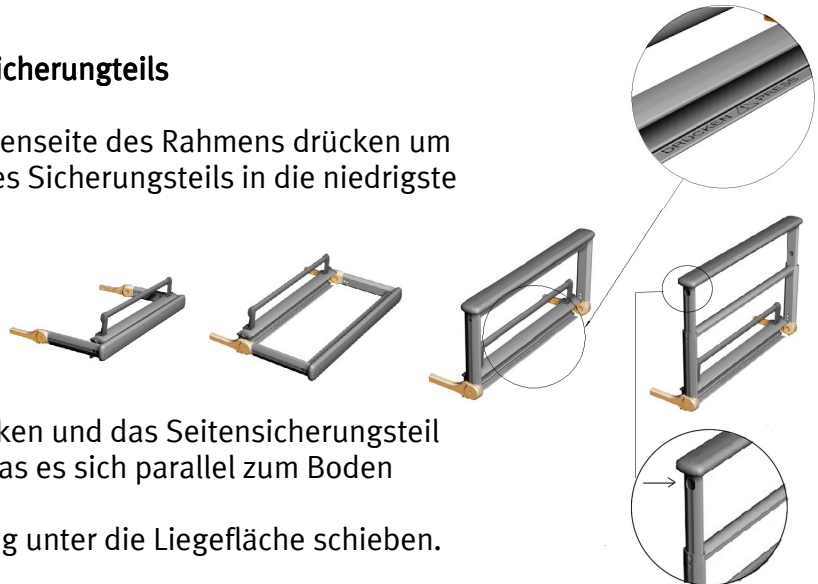


B. Patientenhandschalter

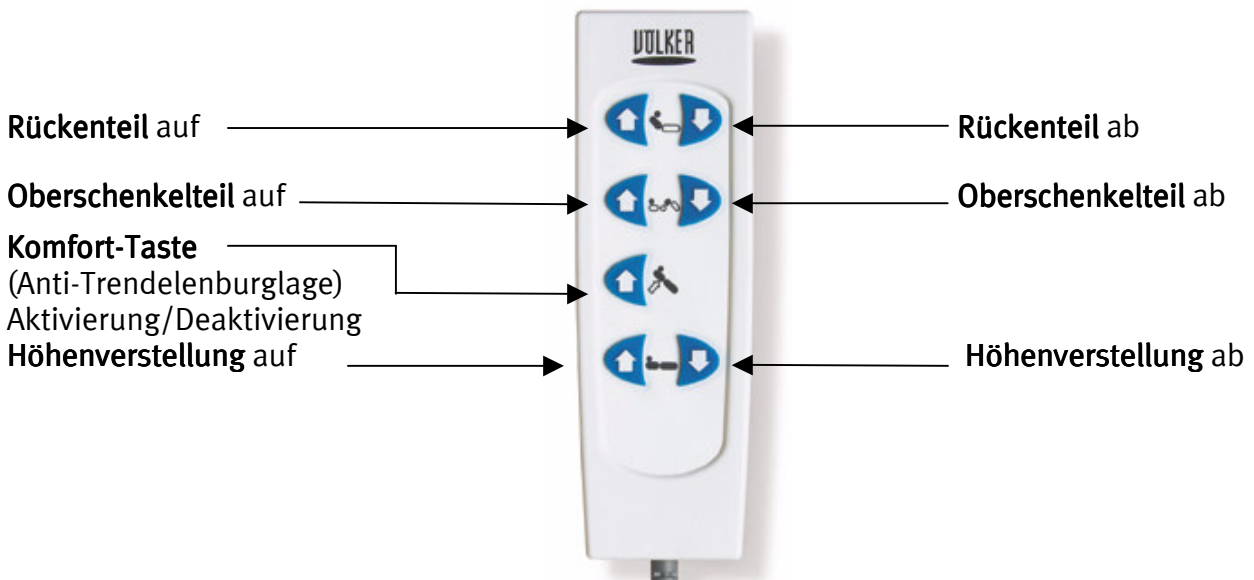

C. Schwesterntastatur in Fußteil integriert

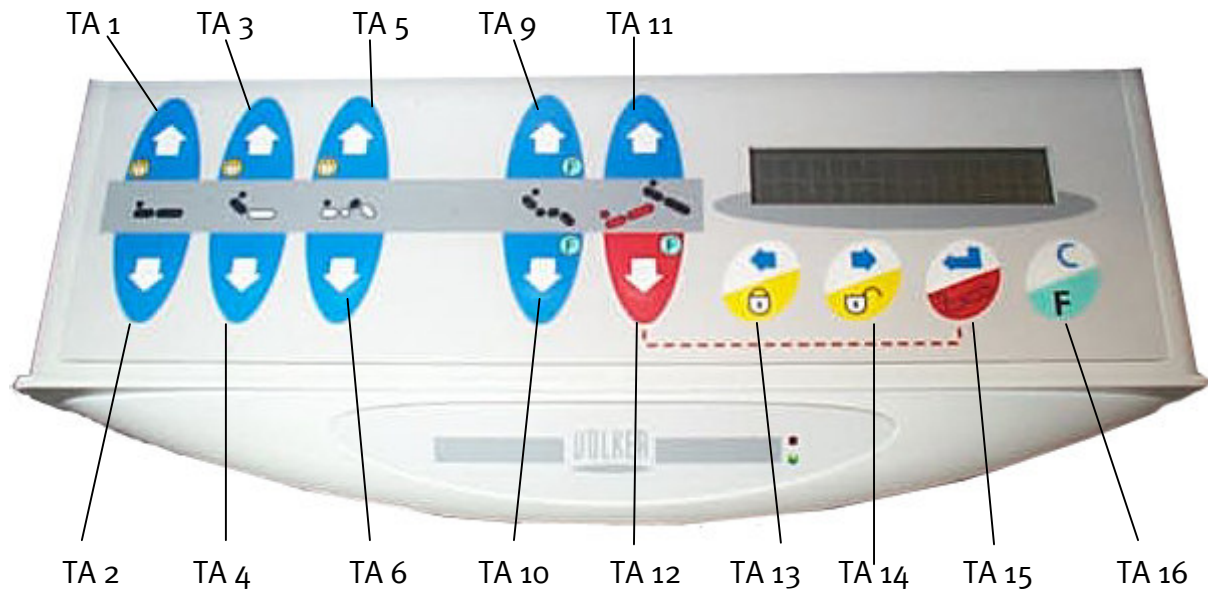

Bewegungs-Taste 1 + 2	Höhenverstellung auf/ab
Bewegungs-Taste 3 + 4	Rückenteil auf/ab
Bewegungs-Taste 5 + 6	Oberschenkelteil auf/ab
Bewegungstaste 9	Cardiac-Chair-Position
Bewegungstaste 10	Grundstellung
Bewegungstaste 11	Anti-Trendelenburg (Fußtiefelage der Liegefläche)
Bewegungstaste 12	Kippen in die Waagerechte aus der Anti-Trend.-Pos.
Menü-Taste 13	Taste zum Sperren in Verbindung mit einer der mit einem gelben Punkt versehenen Bewegungstasten
Menü-Taste 14	Taste zum Entsperren in Verbindung mit einer der mit einem gelben Punkt versehenen Bewegungstasten
Bewegungs-Taste 12 + Menü-Taste 15	Trendelenburg (Kopftiefelage der Liegefläche)
Menü-Taste 16	Funktionstaste/Löschtaste
Menü-Taste 12 + Menü-Taste 14	Zugang zum Benutzermenü

 Bitte beachten Sie die Hinweise in der ausführlichen Bedienungsanleitung