


A. Seitensicherung

Aufstellen der Seitensicherung


Ziehen Sie die Seitensicherung seitlich bis zum Anschlag heraus und klappen Sie sie hoch. Um die Höhe der Seitensicherung einzustellen, ziehen Sie den teleskopierbaren Teil bis zum Anschlag nach oben.

Herunterklappen der Seitensicherung

1. Drücken Sie die beiden Knöpfe auf der Außenseite, um den teleskopierbaren Teil der Seitensicherung in die niedrigste Position zu bringen.
2. Drücken Sie (2a) den Auslöser nach unten und (2b) kippen Sie die Seitensicherung in die Horizontale.
3. Schieben Sie die Seitensicherung vollständig unter die Liegefläche.

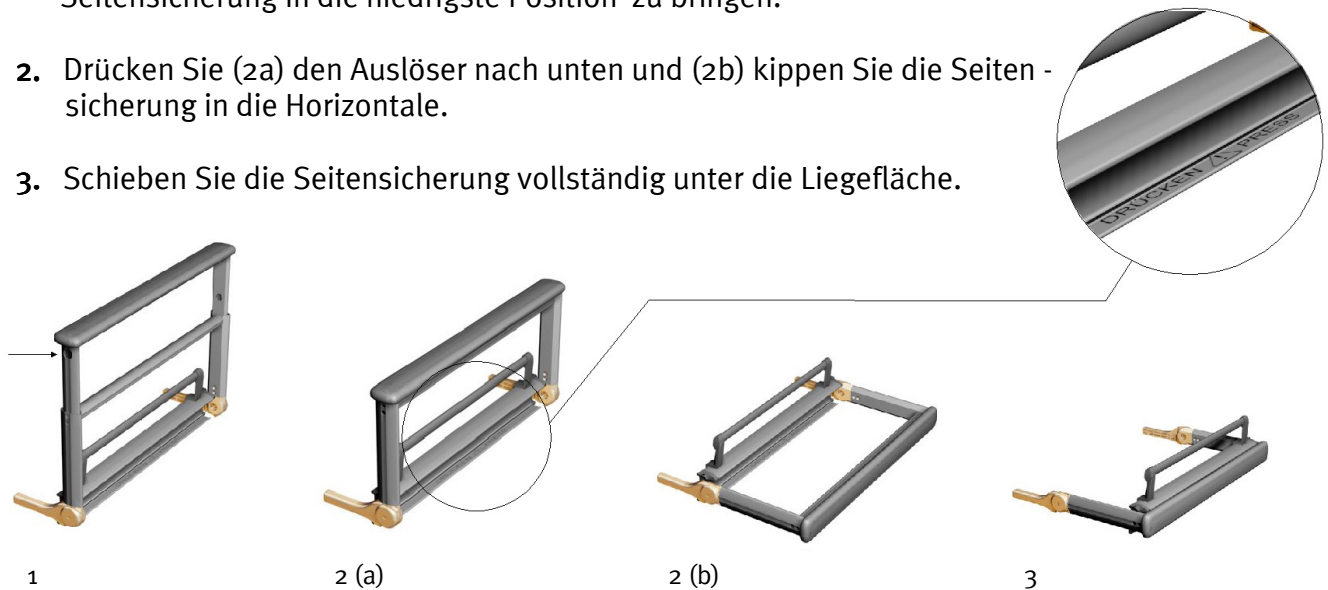

B. Patientenhandschalter

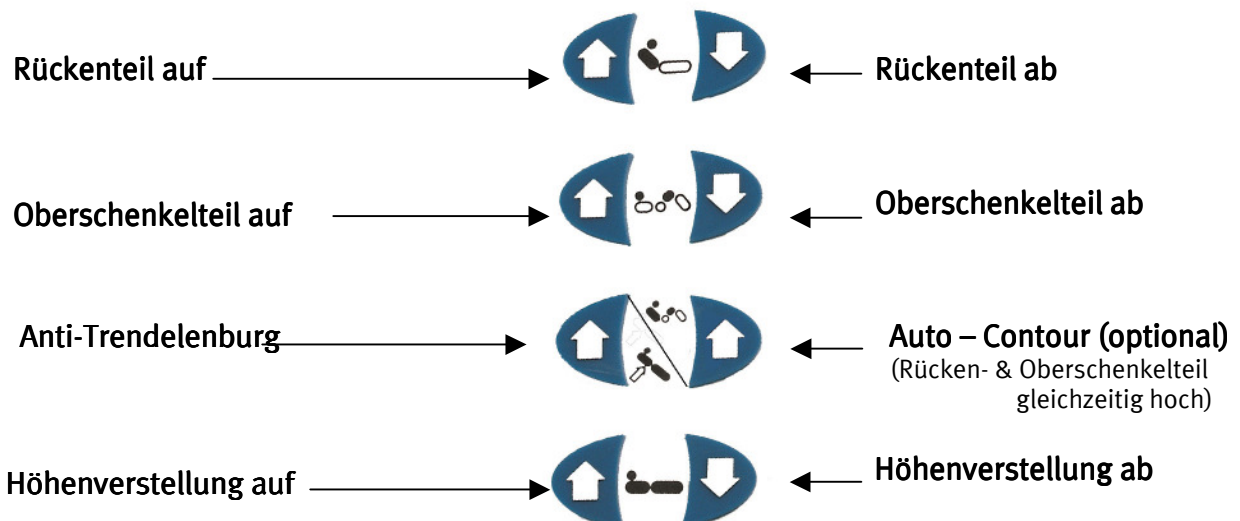

Kurzgebrauchsanweisung für Klinikbett Modell S 960-2

C. Personaltastatur mit Komplettspernung

Höhenverstellung

Hebt/Senkt die gesamte Liegefläche des Bettes in die gewünschte Position auf und ab.

Rückenteil

Anheben und Absenken des Rückenteils



Anti Trendelenburg

Hebt die gesamte Liegefläche kopfseitig hoch

Trendelenburg

Hebt die gesamte Liegefläche fußseitig hoch

Beinenteil

Anheben und Absenken des Beinenteils

Durch die Aktivierung der Sperre am Patientenhandschalter werden alle Funktionen des Handschalters gesperrt. Die Personaltastatur bleibt funktionsfähig.




Aktivierung der Sperre



Deaktivierung der Sperre

D. Personaltastatur mit Einzelspernung (optional)

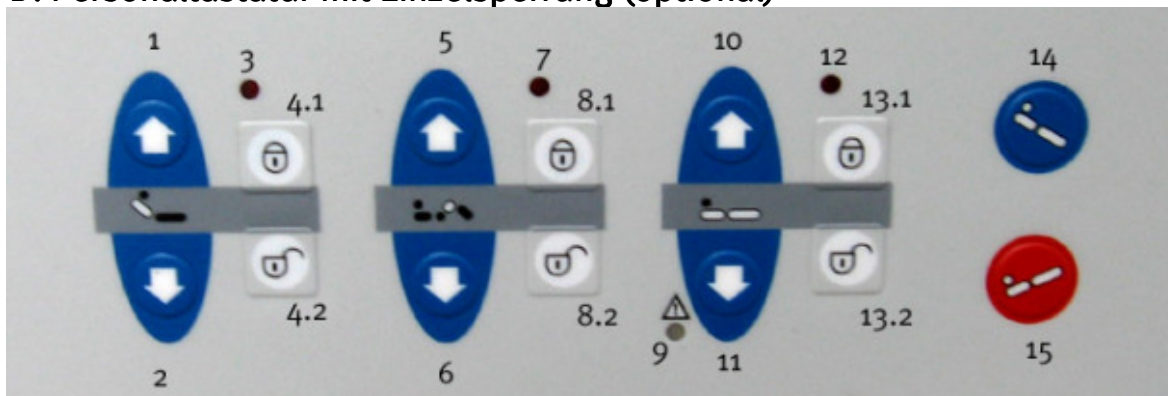

- | | |
|-------------------------------------|--|
| 1 Rückenteil auf | 9 LED - unterste Position der Höhenverstellung |
| 2 Rückenteil ab | 10 Höhenverstellung auf |
| 3 LED – Sperrung Rückenteil * | 11 Höhenverstellung ab |
| 4.1 Rückenteil sperren | 12 LED – Sperrung Höhenverstellung * |
| 4.2 Rückenteil entsperren | 13.1 Höhenverstellung sperren |
| 5 Oberschenkelteil auf | 13.2 Höhenverstellung entsperren |
| 6 Oberschenkelteil ab | 14 Anti-Trendelenburg |
| 7 LED – Sperrung Oberschenkelteil * | 15 Trendelenburg |
| 8.1 Oberschenkelteil sperren | |
| 8.2 Oberschenkelteil entsperren | |

* leuchtet wenn Funktion gesperrt und Bewegung angefordert.



Bitte beachten Sie die Hinweise in der ausführlichen Gebrauchsanweisung